

MANIPULATEUR CLIC à cordon interchangeable

INNOVATION

ILPER développe des produits innovants

DESIGN

Le nouveau manipulateur se démarque par son design, son ergonomie et se nettoie également facilement

PRATIQUE

Il est possible d'interchanger le cordon très facilement puisqu'il suffit de débrancher la fiche RJ45 du manipulateur en veillant de déverrouiller la sécurité avant avec une « tige » du type trombone.

SOUPLESSE

Il existe plusieurs modèles de manipulateurs et de cordons permettant d'avoir de multiples combinaisons selon le besoin du patient dans la chambre.

Poires, manipulateurs avec télécommandes lumières ou autres avec cordons 3m ou 5m.



CARACTERISTIQUES

- Nouveau Design
- Boutons d'appel et de télécommande
- Prise RJ45
- Cordons facilement interchangeables 3 et 5m
- Conforme aux Normes DIN VDE 0834

INTERCHANGEMENT FACILE

Le cordon peut être facilement interchangeable.

Insérer la « tige » dans le trou pour déverrouiller la fiche et enlever le cordon en tirant

Remettre le nouveau cordon en branchant la RJ45 dans la prise du manipulateur jusqu'au « Clic »

